

## Thealoz Duo Göz Damlası

**Endikasyonlar:** Thealoz Duo, orta dereceli veya şiddetli kuru göz sendromunun tedavisinde gözün korunması, hidrasyonu ve kayganlaştırmasında endikedir. **Uygun Olduğu Kişiler:** Yetişkinler, çocuklar, hamile veya emziren kadınlar, herhangi bir tür kontakt lens kullanan kişiler. **Kontrendikasyonlar:** Thealoz Duo'yu içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız. **Cihazın Tanımı:** Thealoz Duo, trehaloz (%3), sodyum hiyalüronat (%0.15), sodyum klorür, trometamol, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk sudan oluşan bir oftalmik çözeltidir. Thealoz Duo, steril, fosfat içermeyen, hipotonik ve pH açısından nötr bir çözeltidir. Çözelti, ABAK® çoklu doz şişede tedarik edilmektedir. Bu cihaz, göz damlasını gözeneğe büyüklüğü 0.2 µm olan bir filtre yoluyla ileterek, herhangi bir koruyucu kullanmaksızın çözeltiyeye bakteri bulaşmasını önlemektedir. Bu nedenle, Thealoz Duo koruyucu içermediğinden gözlemlere karşı hassas şekilde etki etmektedir. Koruyucu olmaması, oküler dokuların korunmasına olanak sağlamaktadır ve koruyuculara duyarlı kullanıcılarda hiçbir reaksiyona neden olmamaktadır. **Yarar, Performans ve Etki Mekanizması:** Thealoz Duo, orta ve şiddetli kuru göze bağlı gözde rahatsızlık, batma, yabancı madde veya tahriş hissi durumlarında önerilmektedir. Rüzgar, duman, kirlilik, toz, güneşli veya soğuk koşullar, kuru sıcak, klima, uçak yolculukları, uzun saatler boyunca bilgisayar ekranı karşısında çalışılması gibi dış faktörler ile refraktif ve katarakt ameliyatları gibi göz ameliyatları bu semptomlara neden olabilmektedir. Thealoz Duo, uygulamanın hemen ardından başlayıp tüm gün süren rahatlık sağlayıp göz kuruluğu semptomlarını gidermektedir. Thealoz Duo oküler yüzeyde iyi tolere edilmektedir ve herhangi bir tip kontakt lens kullanan kişiler tarafından kullanılabilir. Thealoz Duo'nun ana bileşenleri trehaloz ve sodyum hiyalüronattır. Trehaloz, birçok bitki ve hayvanda bulunan doğal bir maddedir ve fazlasıyla kuru koşullarda dahi bitki ve hayvanların hayatta kalabilmelerini sağlamaktadır. Koruyucu ve hidrate edici özelliklere sahiptir. İnsan gözünde bulunan doğal bir madde olan sodyum hiyalüronat, göz yüzeyini hidrate etmek ve kayganlaştırmak için su tutmaktadır. Çözeltiyi göz yüzeyinde tutarak uzun süreli rahatlama sağlamak ve oküler yüzeyin iyileşme süresini kısaltmaktadır. **Genel Kullanım Önerileri:** Günde 4 ila 6 kez, her göze 1'er damla. Kullanmadan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Şişeyi açmak için herhangi bir alet kullanmayınız. Alt göz kapağını aşağı çekerek ve yukarı bakarak, göz kapağının içine bir damla uygulayınız. Uygulamadan sonra gözünüzü kapatınız. Şişeyi kullandıktan sonra kapağını geri takınız. **Kullanım Uyarıları:** Bu ürün tek bir hastada birden fazla kez kullanılmaktadır. Başkasına bulaşmayı önlemek için, şişeyi başkalarıyla paylaşmayınız. İlk kullanımdan önce şişedeki kurcalamaya dayanıklı halkanın sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. Bulaşmayı önlemek için, şişenin ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz. Semptomlarınız kötüye giderse veya iyileşmezse doktrunuz veya eczacınızla iletişime geçmeniz gerekmektedir. **Uyarılar:** Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Kullanımdan sonra, görüşünüz bulanıklaşırsa araç veya makine kullanmayınız, birkaç dakika görüşünüzün netleşmesini bekleyiniz. İki farklı göz ürünü kullanırken en az 10 dakika ara veriniz. Thealoz Duo'yu asla sulandırmayınız veya başka çözeltilerle karıştırmayınız. Şişe ilk kullanımdan sonra düşük atmosferik basınca maruz kalırsa sızdırabilir. **Yan Etkiler:** Seyrek görülen hafif bir göz tahrişi ve kızarıklık olasılığı. Bu tür bir durumda, kontakt lens kullanan kişiler lenslerini çıkarmalıdır. Göz damlası kullanırken, gözde yanma hissi, batma hissi, yabancı madde hissi ve kısa süreli olarak bulanık görme gibi bazı rahatsız edici semptomlar yaşayabilirsiniz. Bu ürünü kullandıktan sonra herhangi bir yan etki yaşarsanız veya olağan dışı bir şey hissederseniz, lütfen doktorunuz ile iletişime geçiniz. **Saklama ve İmha Koşulları:** 8°C ila 30°C arasındaki sıcaklıklarda saklayınız. Ürününüzü doğrudan güneş ışığına veya neme maruz bırakmayınız. Şişede ve kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Ürün açıldıktan sonra altı ay sonrasına kadar kullanılabilir. Ürünü bilinçli ve yerel kılavuzlara göre imha ediniz. **Üretici:** Laboratoires Thea, Fransa. **Türkiye'de İthalatçı ve Dağıtıcı firma:** Thea Pharma İlaç Tic. Ltd. Şti. Hakkı Yeten Cad. No:10/C Kat:21 Fulya Beşiktaş, İstanbul. [www.theapharma.com.tr](http://www.theapharma.com.tr)

04/8.2.2023

CE 0459

CE 0459