

THEALoz® DUO JEL

ENDİKASYONLAR: THEALoz DUO JEL, orta dereceli veya şiddetli kuru göz sendromunun tedavisinde gözün korunması, hidrasyonu ve kayganlaştırmasında endikedir. Yalnızca oküler kullanım içindir. **UYGUN**

OLDUĞU KİŞİLER: Yetişkinler, çocuklar (ürünü ebeveynler veya bakıcılar uygulamalıdır), mevcut bilgilere göre hamile veya emziren kadınlar. **KONTRENDİKASYONLAR:** Enjekte etmeyiniz veya yutmayınız.

THEALoz DUO JEL 'i içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız. **CİHAZIN**

TANIMI: THEALoz DUO JEL, trehaloz (%3), sodyum hiyalüronat (%0.15), karbomer (Carbopol 974P, %0.25), sorbitol, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk sudan oluşan bir oftalmik jeldir. THEALoz DUO JEL, steril, fosfat içermeyen, hipotonik ve pH açısından nötr bir sıvı jeldir. THEALoz DUO JEL koruyucu içermediği için gözlere hassas şekilde etki etmektedir. Koruyucu olmaması, oküler dokuların korunmasına olanak sağlamaktadır ve koruyuculara duyarlı kullanıcılarda hiçbir reaksiyona neden olmamaktadır. **YARAR, PERFORMANS VE**

ETKİ MEKANİZMASI: THEALoz DUO JEL, orta ve şiddetli kuru göze bağlı gözde rahatsızlık, batma, yabancı madde veya tahriş hissi durumlarında önerilmektedir. Rüzgar, duman, kirlilik, toz, güneşli veya soğuk koşullar, kuru sıcak, klima, uçak yolculukları, uzun saatler boyunca bilgisayar ekranı karşısında çalışılması gibi dış faktörler ile refraktif cerrahi ve katarakt cerrahisi gibi oküler cerrahiler bu semptomlara neden olabilmektedir. THEALoz DUO JEL, gözlerde rahatlık sağlamakta ve aşağıda belirtildiği gibi kuru göz semptomlarını uzun süreli olarak gidermektedir. THEALoz DUO JEL' in ana bileşenleri trehaloz, sodyum hiyalüronat ve karbomerdir (Carbopol 974P). Trehaloz, birçok bitki ve hayvanda bulunan doğal bir maddedir ve aşırı kuru koşullarda dahi bitki ve hayvanların hayatta kalabilmelerini sağlamaktadır. Koruyucu ve hidrate edici özelliklere sahiptir. İnsan gözünde bulunan doğal bir madde olan sodyum hiyalüronat, göz yüzeyini hidrate etmek ve kayganlaştırmak için su tutmaktadır. Çözeltiyi göz yüzeyinde tutarak uzun süreli rahatlatma sağlamakta ve oküler yüzeyin iyileşme süresini kısaltmaktadır. Karbomer THEALoz DUO JEL' in göz yüzeyinde daha uzun süre kalmasına olanak vererek, kuru göz belirtileri ve semptomlarını uzun süreli olarak gidermektedir. THEALoz DUO JEL' in içeriğindeki özel trehaloz, sodyum hiyalüronat ve karbomer kombinasyonu göz yüzeyinde uzun süreli koruma, hidrasyon ve kayganlaştırma sağlamaktadır. **GENEL KULLANIM ÖNERİLERİ:** Dozaj: Günde 1 ila 4 kez, her göze 1'er damla. Ancak, THEALoz DUO JEL bir jel olduğu için, geceleri yatmadan hemen önce kullanıma özellikle uygundur. THEALoz DUO JEL kullanabilmek için özel bir eğitim gerekmemektedir. Kontakt lens kullanıyorsanız THEALoz DUO JEL kullanmadan önce lenslerinizi çıkarmanız gerekmektedir. Lenslerinizi tekrar takmadan önce en az 30 dakika bekleyiniz. Kullanmadan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Folyo saşeyi açınız ve bir tek kullanımlık flakonu şeritten çıkarınız. Şeridin kalanını saşenin içine geri koyunuz. Flakonu açmak için herhangi bir alet kullanmayınız. Flakonu ters çeviriniz, nazikçe sallayınız ve jel aşağı inene kadar flakona vurunuz. Flakonu açmak için üstteki kapakçığı döndürerek koparınız. Bulaşmayı önlemek için, flakonun ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz. Damla görene kadar sıkınız. Alt göz kapağını nazikçe aşağı çekerek ve yukarı bakarak, göz kapağının içine bir damla uygulayınız. Uygulamadan sonra gözünüzü nazikçe kapatınız. İçinde jel kalmış olsa bile, tek kullanımlık flakonu çöpe atınız, saklamayınız. **KULLANIM UYARILARI:** Ürünü ilk kez kullanmadan önce ambalajının sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. Yalnızca saşeler ve tek kullanımlık flakonlar açılmamışsa kullanınız. Bulaşmayı önlemek için, flakonun ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz. Flakonu tekrar kullanmayınız; flakon açıldıktan sonra içeriği mikrobiyal kontaminasyondan korunmamaktadır. Semptomlarınız kötüye giderse veya iyileşmezse doktorunuza veya eczacınıza iletişime geçmeniz gerekmektedir. **UYARILAR:** Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Kullanımdan sonra, görüşünüz bulanıklaşırsa araç veya makine kullanmayınız: birkaç dakika görüşünüzün netleşmesini bekleyiniz. İki farklı göz ürünü kullanırken en az 15 dakika ara veriniz. THEALoz DUO JEL en son kullanılmalıdır. **YAN ETKİLER:** Gözlerde yapışkanlık, bulanık görme, alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık, göz kapağında şişlik, döküntü gibi), gözlerde akıntı, nadir görülen göz tahrişi olasılığı, gözlerde ağrı, gözde kızarıklık. Göz jeli kullanırken, gözde yanma hissi, batma hissi, yabancı madde hissi ve kısa süreli olarak bulanık görme gibi bazı rahatsız edici semptomlar yaşayabilirsiniz. Bu ürünü kullandıktan sonra herhangi bir yan etki yaşarsanız veya olağan dışı bir şey hissederseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza iletişime geçiniz ve bu bilgiyi dağıtıcı veya üreticiye bildiriniz. **SAKLAMA VE İMHA KOŞULLARI:** 8 °C ila 30 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayınız. Ürününüzü doğrudan güneş ışığına veya neme maruz bırakmayınız. Tek kullanımlık flakonları içinde jel kalmış olsa bile derhal çöpe atınız. Açılmamış tek kullanımlık flakonu ışıktan korumak için saşesinde saklayınız. Açılmamış tek kullanımlık flakonlar saşenin açılmasından bir ay sonrasında kadar kullanılabilir. Tek kullanımlık flakonlarda ve kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Ambalaj sağlam olduğu ve ürün doğru saklandığı sürece, son kullanma tarihi o ayın son gününü göstermektedir. Ürünü bilinçli ve yerel kılavuzlara uygun şekilde imha ediniz (tek kullanımlık flakon ve saşeyi evsel atık olarak imha edilmelidir; dış kutu ve kullanma talimatı geri dönüştürülebilir). **Üretici:** Laboratoires Thea, Fransa. **Türkiye'de İthalatçı ve Dağıtıcı firma:** Thea Pharma İlaç Tic. Ltd. Şti. Hakkı Yeten Cad. No:10/N Kat:21 Fulya Beşiktaş, İstanbul. www.theapharma.com.tr



0459

03/V10/06.2026